

Profitez pleinement de nos
PROTECTIONS AUDITIVES
ANTI-BRUIT SOMMEIL



L'effet immédiat



EMBOUTS SOMMEIL

Les embouts protecteurs pour le sommeil sont conçus pour réduire efficacement les nuisances sonores telles que les ronflements, le bruit du voisinage, le trafic routier et d'autres bruits ambiants.

Le modèle 25sh est défini par défaut pour offrir une atténuation optimale et un confort maximal pendant la nuit.

❗ **Les bouchons d'oreilles diminuent le bruit, mais ne le rendent pas totalement inaudible.**

Le bruit se propage de deux manières : par l'air et par les os. Les vibrations sonores sont absorbées par les os du crâne, un phénomène appelé conduction osseuse. Ces vibrations font vibrer le tympan, nous permettant ainsi de percevoir les sons.

Par conséquent, les bouchons d'oreilles ne bloquent jamais complètement l'ouïe. Ils atténuent le bruit ambiant, le rendant moins intense, mais vous continuerez à percevoir certains sons.

Ex. Le volume de ronflements peut dépasser parfois 95 Db. L'atténuation moyenne des anti-bruit sommeil est de (SNR) 25 dB à 30dB.

❗ **Une meilleure qualité d'empreinte, une empreinte profonde = anti-bruit plus performant !**



- ✓ **Conception sur-mesure** : parfaitement adaptés à votre oreille.
- ✓ **Silicone souple** : garantit un port agréable et doux pour la peau.
- ✓ **Atténuation optimale** : une réduction des sons ajustée à vos besoins.
- ✓ **Confort prolongé** : port agréable toute la nuit.
- ✓ **Durabilité** : lavables et réutilisables pour une utilisation durable.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE DE L'EMBOUT



- Avec les mains propres, retirez l'embout de son emballage ;
- Repérez le côté droit et le gauche;



- Prenez l'embout entre le pouce et l'index et insérez le délicatement dans le conduit auditif en effectuant de légères rotations;
- Pour faciliter l'insertion, tirez l'oreille vers le haut et l'arrière pendant la mise en place de l'embout;
- Vérifiez que la protection est bien en place et ajustée;



Ainsi, vous bénéficierez d'une sécurité optimale lors d'expositions à des niveaux sonores élevés.


CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Portez les anti-bruit durant tout le temps d'exposition au bruit.
- Nettoyez les embouts à l'eau savonneuse ou avec une lingette antiseptique nettoyante.
- Lorsque vous ne portez pas les embouts, conservez-les dans leur étui d'origine/pochette souple.
- Contrôlez toujours les anti-bruit pour s'assurer de leur état.
- Pour un confort et une performance optimale, pensez à renouveler vos embouts tous les 2 ans au maximum.




CARACTÉRISTIQUES DES ANTI-BRUIT SOMMEIL

Formes

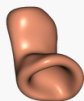

CANULE
sans poignée

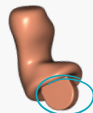

CANULE
avec poignée



CONQUE
sans poignée



CONQUE
avec poignée

Shores

25 sh : Pour un confort optimal

40 sh : Pour plus de variété de couleur

Couleurs

	Transp.	Rosé transp.	Blanc	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Marron	Beige	Rose	Violet	Noir
25 sh	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
40 sh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

☑ Mélange de couleurs ou Paillettes possible

Options

- Cordons de liaison en PVC amovible (rouge, bleu, transparent, jaune)
- Pince pour cordon
- Pochette souple

Découvrez tous nos produits sur notre site
www.inea-audition.com

☎ 01 34 67 67 17

✉ • contact@inea-audition.com
• commande3d@inea-audition.com

📍 19 Avenue de l'Eguillette,
95310 Saint-Ouen l'Aumône