

Profitez pleinement de nos
PROTECTIONS AUDITIVES
ANTI-EAU



L'effet immédiat



BOUCHONS D'EAU

Les bouchons anti-eau sont indispensables pour protéger les oreilles lors de la baignade, des sports aquatiques ou même sous la douche. En empêchant l'eau de pénétrer dans le conduit auditif, ils aident à prévenir les infections souvent causées par une humidité excessive.

❗ **Empreinte parfaite exigée pour éviter les infiltrations d'eau causant des otites.**

LES BOUCHONS D'EAU FLOTTANT ET NON-FLOTTANT

Les embouts auriculaires en silicone, utilisés comme bouchons d'eau, se déclinent en deux types : non-flottants et flottants. Les modèles non-flottants sont plus denses et offrent un bon maintien, mais ne flottent pas dans l'eau. Ils sont disponibles dans une large gamme de coloris pour répondre aux préférences personnelles. En revanche, les bouchons flottants, grâce à l'ajout de micro-bulles dans le silicone, sont plus légers et peuvent flotter, ce qui les rend plus pratiques en cas de perte dans l'eau. Dans les deux cas, le silicone garantit confort et efficacité pour protéger les oreilles de l'eau.



- ✓ **Conception sur-mesure** : parfaitement adaptés à votre oreille.
- ✓ **Silicone souple** : garantit un port agréable et doux pour la peau.
- ✓ **Confort prolongé** : port agréable durant tout le temps où l'embout est porté.
- ✓ **Protection totale** : bloque efficacement l'eau
- ✓ **Durabilité** : lavables et réutilisables pour une utilisation durable.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE DE L'EMBOUT



- Avec les mains propres, retirez l'embout de son emballage ;
- Repérez le côté droit et le gauche;



- Prenez l'embout entre le pouce et l'index et insérez le délicatement dans le conduit auditif en effectuant de légères rotations;



- Pour faciliter l'insertion, tirez l'oreille vers le haut et l'arrière pendant la mise en place de l'embout;
- Vérifiez que la protection est bien en place et ajustée;

Ainsi, vous bénéficierez d'une sécurité optimale lors d'expositions à des niveaux sonores élevés.


CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Portez les anti-bruit durant tout le temps d'exposition au bruit.
- Nettoyez les embouts à l'eau savonneuse ou avec une lingette antiseptique nettoyante.
- Lorsque vous ne portez pas les embouts, conservez-les dans leur étui d'origine/pochette souple.
- Contrôlez toujours les anti-bruit pour s'assurer de leur état.
- Pour un confort et une performance optimale, pensez à renouveler vos embouts tous les 2 ans au maximum.



CARACTÉRISTIQUES DES BOUCHONS D'EAU

Forme

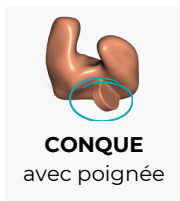

Modèles

Non-flottant : Pour un large choix de coloris

Flottant : Constitué de micro-bulles, ce qui donne un embout allégé -> flottant

Couleurs

	Transp.	Rosé transp.	Blanc	Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Marron	Rose	Violet	Noir
Non-flottant 40 sh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flottant	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗

✓ Mélange de couleurs ou Paillettes possible

Options

- Cordons de liaison en PVC (rouge, bleu, transparent, jaune)
- Cordon en nylon noir
- Pince pour cordon
- Étui rigide étanche - Beach Box

Découvrez tous nos produits sur notre site
www.inea-audition.com

☎ 01 34 67 67 17

📍 19 Avenue de l'Eguillette,
95310 Saint-Ouen l'Aumône

✉ contact@inea-audition.com
commande3d@inea-audition.com